

Pt

Discos de Feltro Impregnado

Rodas de feltro natural com 12mm de diâmetro impregnadas com abrasivo e lubrificante, para polimento de compósitos, amálgama e metais.

Uso: Instalar o mandril no contra-ângulo. Encaixar o disco na extremidade do mandril. Aplicar o produto em baixa rotação, exercendo pouca pressão e em movimentos circulares e intermitentes.

Conexão com contra-ângulo: O Mandril é fabricado de acordo com as especificações da ISO 1797.

Advertências, precauções e restrições: Uso profissional. É recomendável controlar o sentido de rotação do micro motor, uma vez que o parafuso do mandril pode se soltar. O uso do mandril ou discos de feltro impregnado em conjunto com produtos similares é de inteira responsabilidade do usuário. Recomenda-se que a utilização do produto seja sempre acompanhada de isolamento absoluto do campo operatório, uma vez que objetos podem ser deglutidos ou aspirados acidentalmente. Quando existir comprovada alergia a qualquer um de seus componentes, o produto não deve ser utilizado. Os discos devem ser descartados após cada paciente. Sua reutilização pode causar contaminação cruzada.

Esterilização: O Mandril é autoclavável (126°C, 147kPa, 16min). Antes da esterilização, realizar a limpeza com o auxílio de água e detergente enzimático.

Princípio físico de funcionamento: O feltro impregnado com abrasivo em atrito com a superfície dos dentes proporciona o polimento.

Ref.	Código	Conteúdo / Contenido
3041	0001020001	Discos de Feltro Impregnado 24 unid. / Discos de Fieltro Impregnado 24 unid.

Composição: Discos: Óxido de alumínio e Feltro de lã. Mandril: Metal.

Armazenagem: Armazenar em local seco e ao abrigo da luz solar.

Versão 06 - 09/2017

TDV Dental Ltda.
 CNPJ 81.591.786/0001-60
 XV de Novembro, 9944 | CEP 89107-000
 Pomerode/SC – Brasil
 Reg. ANVISA 10291220033
 Resp. Técn. Tais Cúgola C. Pereira | CRF/SC 13884
 Uso profissional / Uso profesional.
 Ver instruções de uso / Ver instrucciones de uso.
 ☎ 55 47 3395-6115 | 0800 47 1020
 info@tdv.com.br | www.tdv.com.br

EC REP

Obelis S.A
 Bd. Général Wahis 53
 1030 Brussels, Belgium
 Tel: +(32) 2.732.59.54
 E-mail: mail@obelis.net

	Esterilizable
Discos	Mandril

Es

Discos de Fieltro Impregnado

Son discos de fieltro 12 mm de diámetro, impregnados con abrasivo y lubricante, para el pulimento de composites, amalgama y metales.

Uso: Instalar el mandril en el contra-ángulo. Ajustar el disco en la extremidad del mandril. Aplicar a baja toración, ejerciendo poca presión, en movimientos circulares y con toques intermitentes.

Conexión con contra-ángulo: El Mandril es fabricado de acuerdo con las especificaciones de la norma ISO 1797.

Advertencias, precauciones y restricciones: Uso profesional. Se recomienda que se verifique el sentido de la rotación del micro motor, ya que durante el proceso de rotación el tornillo del mandril se puede aflojar. La utilización del mandril o discos de fieltro impregnado con productos similares es de entera responsabilidad del usuario. Para evitar la deglución o aspiración accidental de este producto, se recomienda el aislamiento absoluto del campo operatorio. No utilizar en pacientes que tengan antecedentes de alergia a cualquiera de los componentes de este producto. Los discos deben ser desechados luego de cada paciente. Su reutilización puede causar contaminación cruzada.

Esterilización: El mandril es autoclavable (126°C, 147kPa, 16min). Antes de la esterilización, realizar la limpieza con ayuda de agua y detergente enzimático.

Principio físico de funcionamiento: El fieltro impregnado con abrasivo en contacto con la superficie de los dientes proporciona el pulimento.

Composición: Discos: Óxido de aluminio y fieltro de lana. Mandril: Metal.

Almacenamiento: Almacenar en el local seco y al abrigo de la luz solar.

Versión 06 - 09/2017

