

Pt
Mandril Praxis / Mandril Versaplus

Uso: Encaixar o mandril no contra-ângulo. Encaixar o disco/ponta na extremidade do mandril.

Compatível com:

Mandril Praxis - discos Praxis.
Mandril Versaplus - Superfix, Optimize, Polifix, Profilax, Polimax.

Princípio físico de funcionamento: O mandril é responsável pela fixação dos sistemas de acabamento e/ou polimento no contra-ângulo e pela transferência do movimento.

Conexão com contra-ângulo: O mandril Praxis/Versaplus é fabricado de acordo com as especificações da ISO 1797-1.

Advertências, precauções e restrições: Uso profissional. O uso do mandril ou discos/pontas em conjunto com produtos não indicados pela TDV é de inteira responsabilidade do usuário. Recomenda-se que a utilização do produto seja sempre acompanhada de isolamento absoluto do campo operatório, uma vez que objetos soltos podem ser deglutidos ou aspirados acidentalmente. Quando existir comprovada alergia a qualquer um dos seus componentes, o produto não deve ser utilizado.

Esterilização: O mandril é esterilizável em autoclave (126°C, 147kPa, 16min). Antes da esterilização, realizar a limpeza com o auxílio de água e detergente enzimático.

Composição: Metal.

Versão 03 - 11/2017

Ref.	Código	Conteúdo / Contenido
9901	0010000000	Mandril Praxis - 10 unidades
9911	0010000008	Mandril Praxis - 1 unidade
9903	0010010003	Mandril Versaplus - 10 un.
9912	0010010015	Mandril Versaplus - 1 un.

Es
Mandril Praxis / Mandril Versaplus

Uso: Instalar el mandril en el contra-ángulo. Adaptar el disco/punta en la extremidad del mandril.

Compatible con:

Mandril Praxis - discos Praxis.
Mandril Versaplus - Superfix, Optimize, Polifix, Profilax, Polimax.

Principio físico de funcionamiento: El mandril cumple con la función de fijar el disco en el contraángulo y transferir el movimiento.

Conexión con contra-ángulo: El mandril Praxis/Versaplus es fabricado de acuerdo con las especificaciones de la norma ISO 1797-1.

Advertencias, precauciones y restricciones:

Uso profesional. No utilizar el producto con rotación superior a 4000RPM. La utilización del mandril o de los discos con productos similares es de entera responsabilidad del usuario. Para evitar la deglución o aspiración accidental de este producto, se recomienda el aislamiento absoluto del campo operatorio. No utilizar en pacientes que tengan antecedentes de alergia al componente de este producto.

Esterilización: El mandril es esterilizable en autoclave (126°C, 147kPa, 16min). Antes de la esterilización, realizar la limpieza con ayuda de agua y detergente enzimático.

Composición: Metal.

Versión 03 - 11/2017

TDV Dental Ltda.

CNPJ 81.591.786/0001-60

XV de Novembro, 9944 | CEP 89107-000 | Pomerode/SC - Brasil

Téc. Resp.: Tais Cúgola C. Pereira | CRF/SC 13884

Reg. ANVISA 10291220030

☎ 55 47 3395-6115 | 0800 47 1020

Uso profissional / Uso profesional.

Ver instruções de uso / Ver instrucciones de uso.

info@tdv.com.br | www.tdv.com.br



Obelis S.A
Bd. Général Wahis 53
1030 Brussels, Belgium
Tel: +(32) 2.732.59.54
E-mail: mail@obelis.net



Esterilizável/
Esterilizable

