

INTRA ORAL LIGHT ELITE

MANUAL LÁMPARA DE LUZ INTRAORAL

Gracias por elegir nuestra lámpara de luz intraoral. Para asegurar un correcto funcionamiento, por favor lea el manual de instrucciones antes de utilizar el producto.

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	Lámpara de luz intraoral	1
1	Protector mordida de silicón chico	1
1	Protector mordida de silicón mediano	1
1	Cargador con cable de 3 m.	1
1	Fundas protectoras desechables	1 Bolsa con 50 pzas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- ›Batería de litio recargable. (1 hora de uso continuo, después de haber cargado durante 1 hora).
- ›3 luces LED blanca con intensidad de 35,000 lux.
- ›2 luces LED azul con intensidad de 1,000 lux. (Esta luz ofrece detección básica de placa, si necesita un análisis más profesional, puede adquirir de forma opcional los lentes de diagnóstico)
- ›Corriente alterna. 110V – 220V.
- ›Corriente continua. 5V – 1mA.

MODO DE USO

1.
Cargue la batería durante 1 hora aproximadamente. La luz se encenderá indicando que se está cargado y se apagará cuando la batería se encuentre completamente cargada.

2.
Para encender o apagar la lámpara, solo es necesario mantener presionado el botón de encendido por 2 segundos.

3.
Para realizar el cambio entre la luz blanca y la luz azul, es necesario presionar el botón de encendido por 1 segundo.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

DESCRIPCIÓN	SOLUCIÓN
La luz indicadora de carga no enciende	Verifique que se encuentre bien conectado el cable USB con la lámpara.
La batería no carga	Verifique que el cable de alimentación esté conectado de forma correcta al convertidor y a la toma de corriente.

RECOMENDACIONES

Antes de utilizar el equipo, es necesario colocar la funda protectora desechable



La lámpara no debe de ser esterilizada



Evite el contacto con el agua



No utilice detergente, ácidos, cloro, esponja para la limpieza de la pieza



GARANTÍA: 6 Meses a partir de la fecha de factura (aplican restricciones). Es necesario proporcionar el N/S y documento para la comprobación.

SOPORTE TÉCNICO
(33) 32 08 38 26 ó 01 800 300 93 926
soportetecnico@zeyco.com.mx

JEFE POST-VENTA
(33) 32 08 38 27
pgalvez@zeyco.com.mx

ATENCIÓN A CLIENTES
(33) 32 08 38 50 ó 01 800 111 93 926
atencionaclientes@zeyco.com.mx

ZEYCO[®]
Zeyco Distribuidor Oficial en México
www.zeyco.com.mx

